

Židle:  
**1284 G a 1284 G dent**

Montážní postup:

1. Vybalte díly z krabice
2. Nasadte kolečka na kříž
3. Postavte kříž kolečky na podlahu a nasadte píst (s plastovým krytem pístu – pokud je součástí balení) do kříže
4. Nasadte kruhovou oporu nohou na píst (platí pro model 1284 G dent)
5. Nasadte kompletní korpus židle s mechanikou na píst
6. Provedte zatížení židle tak, aby všechny části židle do sebe dobře zapadly

Nastavení výšky sezení:

Přitáhněte kruhový ovladač mechaniky směrem nahoru k sedáku. Odlehčením nebo zatížením sedáku si zvolte vyhovující výšku sezení a uvolněte kruhový ovladač.

Nastavení výšky zadové opěrky:

Potažení aretační hlavice „A“ (dle obrázku) umožní nastavit výšku opěrky zad v 5 polohách

Nastavení výšky kruhové opory nohou u modelu 1284 G dent:

Zvolte výšku kruhové podnože tak, aby sezení bylo pro Vás příjemné – aby úhel mezi lýtky a stehny nohou byl větší než 90 stupňů. Zvolenou výšku kruhové podnože zafixujte jemným dotažením aretační hlavice. Násilné dotažení aretační hlavice způsobí deformaci pláště pístu a nefunkčnost pístu.

Ilustrační foto:



Ilustrační foto (1284 G):



Ilustrační foto (1284 G dent):



## Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit měkkým čistým hadříkem s použitím neagresivních čistících prostředků. K oživení plastů lze použít renovační sprej určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze pravidelně zbavovat prachu pomocí vysavače a čistit jen jemným, ne moc mokrým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové je vhodné čistit pravidelně vlhkým bílým hadříkem s možností použití neutrálního mýdlového roztoku. Koženky SILVERTEX a MEDIFLEX lze čistit speciálními čistícími prostředky pro čištění PVC koženek. Koženky LIMA lze čistit speciálními čistícími prostředky pro PU. **Doporučujeme** po každém čištění koženek čistícími prostředky povrch koženky otřít a poté setřít vlhkým hadříkem s čistou vlažnou vodou.

### UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!, za který nenese výrobce odpovědnost
- kruhová opora nohou je určena pro podporu při sezení, nepoužívejte jako „schod“ (nelze zatížit plnou váhou uživatele)
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů a sesycháním dřevěných částí židlí uvolňují. Výrobce nenese odpovědnost za nedostatečnou pravidelnou údržbu výrobku.

## Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Děkujeme Vám za zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesměnné provozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku **60 měsíců** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER a to od data prodeje s tím, že:

### Výrobce neodpovídá za :

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené nebezpečným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

MEDI

1284 G a 1284 G dent

Návod k montáži a  
používání č. 63



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce